


IHR ZAHNARZT

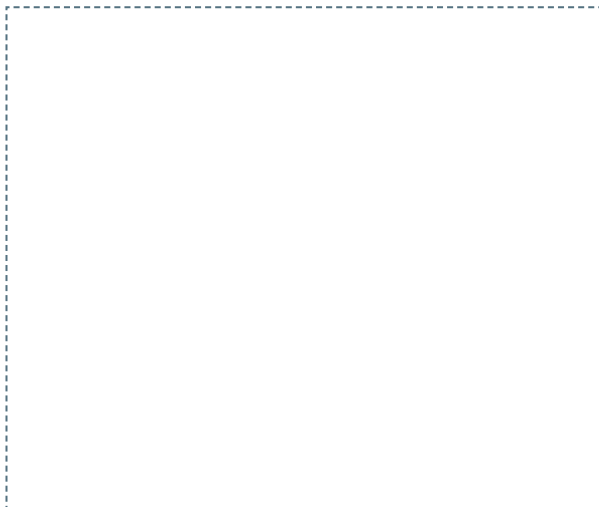

IHR LABOR



Saarburger Ring 30
68229 Mannheim
Tel.: +49 621 48 48 80
Fax: +49 621 48 48 848

kontakt@laufer-zahntechnik.de
www.laufer-zahntechnik.de



Member of:
DELABO LEADING
• GROUP DENTAL
LABS



Pflegeanweisung für Ihren Zahnersatz




**PERFEKTER ZAHNERSATZ
– MADE IN GERMANY
TÜV ZERTIFIZIERT**

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, DASS SIE SICH FÜR EINEN QUALITÄTSZAHN-ERSATZ VON LAUFER ZAHNTECHNIK ENTSCHEIDEN HABEN.

Um möglichst lange Freude an Ihrem neuen Lächeln zu haben, ist die Pflege ein ebenso wichtiger Bestandteil, wie bei Ihren echten Zähnen. Zahnstein, Zahnbelag, Verfärbungen und Bio-Film sind auch bei Zahnersatz ein ernstzunehmendes Thema, da diese die Mundhygiene und auch die Passung Ihres Zahnersatzes negativ beeinflussen.

Darum haben wir für Sie die wichtigsten Pflegetipps zusammengefasst, um mit einem strahlenden Lächeln in den Tag starten zu können.

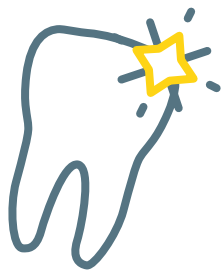

ZAHNERSATZ AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Seit 1989 spornt uns Eines an: Immer besser zu werden, in dem was wir tun. Um das zu erreichen, verbinden wir klassisches Handwerk mit modernster Technik. Das Ergebnis lässt sich sehen – im Lächeln unserer zufriedenen Kunden. Zahnersatz zum bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, ist unsere Passion, mit der wir uns bis heute zu einem der größten und führenden Dentallaboren in Deutschland entwickelt haben.

Wir stellen Zahnersatz auf höchstem Niveau her, spezialisiert auf anspruchsvolle Techniken in den Bereichen Ästhetik, Implantologie und vor allem dem kombinierten Zahnersatz. Dafür setzen wir Funkenerosion, Lasertechnik, computergestützte Kronen- und Brückenfrästechnik sowie allergiefreie Werkstoffe ein.

WAS BENÖTIGEN SIE FÜR DIE PFLEGE IHRER „NEUEN“?

1. Eine **weiche Zahnbürste** oder eine spezielle Prothesenzahnbürste
2. Gel-Zahnpaste oder eine herkömmliche ph-neutrale Seifenlösung



WORAUF SIE GETROST VERZICHTEN KÖNNEN!

Auf Reinigungslösungen oder Reinigungstabletten, denn sie **schaden** Ihrer Prothese unter Umständen mehr, als sie nützen.

Nehmen Sie sich Zeit für ein strahlendes Lächeln: Bürsten Sie **morgens** und **abends** Ihren Zahnersatz mit einer Zahnbürste und Gel-Zahnpaste. **Jeweils zwei Minuten** Pflege schenken Ihnen Freude für den ganzen Tag.



DER TEUFEL STECKT IM DETAIL

Bürsten Sie bitte ganz besonders sorgfältig in den **Zahnzwischenräumen**, dort wo Ihre Prothese am **Gaumen anliegt** und die Teile, die **Kontakt mit dem Restgebiss** haben. Anschließend mit kaltem Wasser spülen. Mit dieser Pflege sorgen Sie für ein gutes Aussehen und Ihre Gesundheit.

Legen Sie am besten **ein Handtuch** bei der Reinigung unter. Bei einem herunterfallen beugen Sie somit eventuellen Beschädigungen vor.

ACHTUNG: Bitte verwenden Sie **keine herkömmliche Zahnpasta**, da diese Mikro-Schleifpartikel enthält, welche die Oberfläche des Zahnersatzes aufrauen und sich so immer leichter Verunreinigungen und Zahnstein festsetzen können.



JÄHRLICHE PROFESSIONELLE REINIGUNG

Um die Qualität und Hygiene Ihres Zahnersatzes zu erhalten, bieten wir in unserem Leistungsspektrum auch **professionelle Prothesenreinigungen** an, bei denen wir mit **modernsten Ultraschall-, Reinigungs- und Poliertechniken** den Glanz in Ihrem Lächeln zurückbringen.

Die professionelle Reinigung beinhaltet nicht nur das polieren und säubern Ihres Zahnersatzes, es wird zusätzlich ein Sichtprüfung durchgeführt, um **etwaige Schäden oder entstandene Schwachstellen** frühzeitig zu erkennen.



Fragen Sie hierzu einfach den Zahnarzt Ihres Vertrauens.